


Устройство ZSI 475 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФАЛЛОПРОТЕЗ

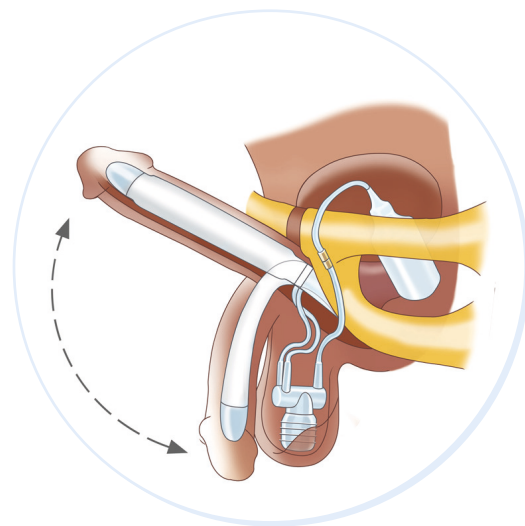

Решение проблемы эректильной дисфункции

- Все стандартные размеры – в одном блистере
- Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.zsimplants.ch



СЭЙДЖ

Эксклюзивный импортер
Zephyr Surgical Implants
в России

Центральный офис

121069, Москва, ул. Малая Никитская,
д. 20/9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 234-39-45, 234-39-46
Факс: +7 (495) 234-39-47
E-mail: info@sagedmed.ru

Северо-западный округ

191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Социалистическая, д. 14, лит. А, оф. 508
Тел./факс: +7 (812) 607-59-98
E-mail: sage-spb@sagedmed.ru

Приволжский округ

603005, г. Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д. 21/2, оф. 401
Тел./факс: +7 (831) 411-94-56
E-mail: sage-volga@sagedmed.ru

Южный округ

350063, г. Краснодар,
Кубанская набережная, д. 45, оф. 304
Тел./факс: +7 (861) 238-61-12
E-mail: sage-kuban@sagedmed.ru

Уральский округ

620137, г. Екатеринбург,
ул. Мира, д. 8, оф. 106
Тел./факс: +7 (343) 286-19-77
E-mail: sage-ural@sagedmed.ru

Сибирский округ

630105, г. Новосибирск,
ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12
Тел./факс: +7 (383) 311-00-73
E-mail: sage-sibir@sagedmed.ru



ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ ФАЛЛОПРОТЕЗА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ОДНОМ БЛИСТЕРЕ*

* Комплект фаллопротеза большого размера, 22 см, с удлинителями – от 21 до 25 см, доступен в отдельном блистере.



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ (ИНТРОДЮСЕР) С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШКАЛОЙ

ШПАТЕЛЬ



ПРОКСИМАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

НАГНЕТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (НАСОС)



ИГЛЫ ДЛЯ ИНТРОДЮСЕРА И КОННЕКТОРА (СОЕДИНИТЕЛЯ)



РЕЗЕРВУАР, 80 мл



ИГЛЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ РАСТВОРОМ



Длина 13 16 19 (см)

Диаметр (Ø) при расширении 16 16 18 (мм)

ПРОТЕЗ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПЕЩЕРИСТОГО ТЕЛА
Длина – 13 см и 16 см, Ø КОЛЬЦА – 12,5 мм. Длина – 19 см, Ø КОЛЬЦА – 14 мм



ДИСТАЛЬНЫЕ И ПРОКСИМАЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

СБОРКА УСТРОЙСТВА



ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ДЛИНУ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ



ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСОЕДИНИТЕ УДЛИНИТЕЛЬ




С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИКРЕПИТЕ ДИСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ К ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ

Длина большого размера – 22 см, диаметр – 21 мм в наполненном состоянии.
Диаметр (Ø) КОЛЬЦА – 14 мм.




СОЖМИТЕ БАЛЛОН ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ПРОТЕЗА
ДИАМЕТР УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ НАПОЛНЕННОМ ПРОТЕЗЕ


ПРИНЦИП РАБОТЫ ФАЛЛОПРОТЕЗА

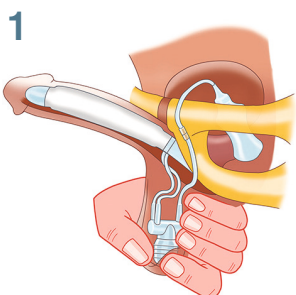


1 Сожмите баллон для наполнения и расширения протеза

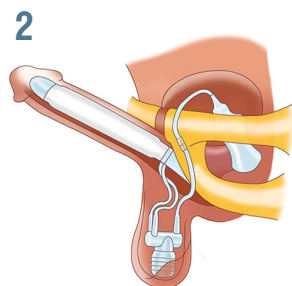

2 Penis находится в эрегированном состоянии

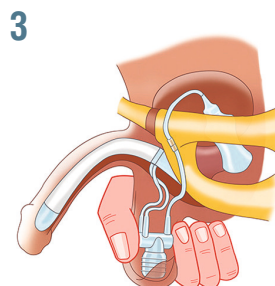

3 Сожмите цилиндр для перехода протеза в спавшееся (дефлатированное) состояние

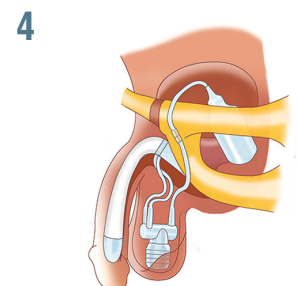

4 Penis становится мягким и расслабленным